

LEAD  HORIZON

CORONA TEST

Vyhodnotenie v
certifikovanom
partnerskom
laboratóriu

ODBER VZORKY
VYKONÁVA
POUŽÍVATEĽ
OFICIÁLNE
SCHVÁLENÉ



UPOZORNENIE!

Dôkladne si uschovajte
leták s kódom nachádzajúci
sa v krabičke.



Name der Testperson:


Dies ist Ihre Probenummer:

 **LEAD Horizon GmbH**
Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien, Austria
www.lead-horizon.com



TESTUJEME ŠKOLY

www.testujemeskoly.sk

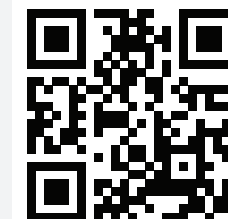

 **HOTLINE: 02/32 26 0916**

 **HOTLINE@TESTUJEMESKOLY.SK**

Pracovné dni od 8:00 do 15:00

Oberová súprava



1. Oberová skúmavka

4. Leták s číslom vzorky

2. Solný roztok

5. Bezpečnostné vrecúško

3. Slamka (prenosová trubička)

6. Absorbčný papierik

Oberová súprava na princípe výplachu ústnej dutiny pre vykonanie PCR testu na detekciu SARS-CoV-2

NÁVOD NA POUŽITIE

Navštívte stránku www.testujemeskoly.sk, kde vás prevedieme celým procesom.

Ešte pred odberom

- Aspoň 1 hodinu pred odberom vzorky sa neodporúča piť, jesť, fajčiť, umývať si zuby či vyplachovať ústa ústnou vodou.
- Pre náš test nie je definovaná spodná veková hranica. Ak si dieťa dokáže vypláchnuť ústa solným roztokom a vyplúť ho cez slamku do odberovej skúmavky, môže test absolvovať.
- Pripravte si zariadenie s časomierou. Môžu to byť napríklad hodinky so sekundovou ručičkou či stopky v mobile.
- K registrácii vzorky do systému budete potrebovať zariadenie s webovým prehliadačom (t. j. počítač, tablet alebo smartfón) a pripojením na internet.
- Podľa obrázku skontrolujte, či je vaša odberová súprava kompletná. V prípade ak zistíte, že v nej niečo chýba, požiadajte vo vašej škole o vydanie nového balenia.

Ober vzorky

- Otvorte nádobku so solným roztokom (2) a roztok nalejte do úst. Roztok neprehŕtajte.
- Dôkladne preplachujte ústnu dutinu so zatvorenými ústami po dobu aspoň 1 minúty (60 sekúnd). Použite pri tom zariadenie na meranie času.
- Následne pomocou slamky (3) naplňte roztokom z úst odberovú skúmavku (1) približne 1 až 2 cm pod vrchný okraj.
- Potom skúmavku so vzorkou (1) dôkladne uzavrite červeným uzáverom.

Zabalenie a odovzdanie odobratej vzorky

- Do bezpečnostného vrecúška (5) vložte uzavretú skúmavku so vzorkou (1) ako aj absorpčný papierik (6).
- Bezpečnostné vrecko (5) dôkladne uzatvorte.
- Potom vložte uzatvorené bezpečnostné vrecko (5) späť do krabičky a uzavrite ju.
- Prebytočný solný roztok (2) môžete vyliať do odtoku. Slamku (3) a nádobku od solného roztoku (2) vyhodte.
- POZOR! Leták (4) NEVRACAJTE DO KRABIČKY!** Leták obsahuje na zadnej strane čiarový kód s číslom vzorky. Toto číslo budete potrebovať na to, aby ste vzorku zaregistrovali do systému a neskôr aj na to, aby ste sa dozvedeli výsledok testu. Z tohto dôvodu si leták s kódom po registrácii starostlivo uschovajte. Na leták odporúčame poznačiť si meno testovanej osoby (žiaka).
- Krabičku s odobratou vzorkou odovzdajte v škole podľa organizačných pokynov vašej školy.

Registrácia vzorky

- Do webového prehliadača zadajte adresu www.testujemeskoly.sk. Použiť môžete PC, tablet alebo smartfón.
- Kliknite na tlačidlo pod videom „Registrovať vzorky“.
- Ak sa vám stránka nezobrazila v slovenskom jazyku, v pravom hornom rohu zmeňte jazyk na Slovenský.
- Kliknite na tlačidlo „Registrovať“.
- Ďalej vyberte Kraj, Okres a Adresu vašej školy.
- Zadajte číslo vzorky, ktoré nájdete na zadnej strane letáku (4).
- Z dôvodu predchádzania chýb, emailovú adresu vypíšte 2-krát.
- V prípade neplostej osoby (teda žiaka) je potrebné zadávať emailovú adresu a telefónne číslo zákonného zástupcu.
- Potvrďte, či ste za posledných 6 mesiacov boli COVID pozitívny.
- Ďalej zadajte ostatné požadované údaje testovanej osoby (Meno, Priezvisko, Pohlavie, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresu trvalého pobytu). Pri zadávaní adresy začnite písaním názvu ulice, alebo názvu obce a systém vám ponúkne zodpovedajúce možnosti na výber. Doplňte číslo domu.

- Zakliknite políčko „Prijímam zásady ochrany osobných údajov“ ak s nimi súhlasíte.
- Potvrďte, či odobratú vzorku poskytla vyššie uvedená testovaná osoba.

Ak ste všetko správne vyplnili, formulár Odošlite. Zobrazí sa informácia o úspešnom odoslaní údajov.

Pozn.: Tlačidlo „Pridať ďalšiu testovanú osobu“ slúži k hromadným odberom na školách.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje sú potrebné na vyhodnotenie testu a doručenie výsledku. Osobné údaje zadávajte len do webového formulára, na ktorý sa dostanete z webovej stránky www.testujemeskoly.sk. Bližšie informácie o spôsobe spracovania osobných údajov sa môžete dozvedieť z dokumentu umiestneného priamo vo formulári. S vašimi údajmi zaobchádzame ako s dôvernými a budú uložené iba po dobu maximálne 14 dní, aby bolo možné v prípade potreby vydať certifikát, alebo aby bolo možné vykonať povinné oznámenie výsledkov testov zodpovednému zdravotníckemu orgánu na základe zákona.

Výsledok testu

Výsledok testu dostanete do 72 hodín od okamihu, kedy vaša škola odovzdá odobraté vzorky na vyhodnotenie do laboratória. Vzorku vyhodnotí certifikované partnerské laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH pomocou metódy PCR (polymerázová reťazová reakcia).

Prostredníctvom emailu dostanete upozornenie s odkazom na internetovú stránku. Aby ste si mohli výsledok testu zobrazit' prípadne stiahnuť k sebe do počítača, budete sa musiet' identifikovať prostredníctvom čísla vašej vzorky (nájdete ho na zadnej strane letáku 4).

O výsledku testu je anonymizovanou formou informovaná aj vaša škola.

Výsledok testu môže byť:

- pozitívny** - testovaná osoba je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
- negatívny** - testovaná osoba nie je infikovaná vírusom SARS-CoV-2
- neutrálny** - vzorku nebolo možné vyhodnotit'

OBSAH:

- 2,5 ml 0,9%-ného roztoku NaCl (2)
- 2 ml tlmiaceho roztoku (1)

SKLADOVANIE:

- Skladujte pri teplote 4° - 25°C!
- Minimálna trvanlivosť: vid' obal

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

- Ober vzorky vykonáva používateľ, vyhodnotenie prebieha v laboratóriu.
- Diagnostika in-vitro.
- Absorpčný papierik (6) musí počas prepravy zostať v bezpečnostnom vrecku (5).
- Vyžaduje sa počítač, tablet alebo smartfón s pripojením na internet, vlastná emailová adresa a mobilné telefónne číslo.
- Najnovšia verzia návodu na použitie je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.testujemeskoly.sk.

ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE:

Oberová súprava Corona Test sa používa na detekciu infekcie SARS-CoV-2. Používateľ odoberie len vzorku. Používateľ nevykonáva molekulárno-biologickú analýzu vzorky. Molekulárno-biologickú analýzu vzorky pomocou metódy PCR vykonáva certifikované partnerské laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH. Výsledok testu je odoslaný používateľovi e-mailom až po vykonaní molekulárno-biologickej analýzy v laboratóriu.

LIKVIDÁCIA:

- Prebytočný solný roztok je možné vyliať do odtoku.
- Prenosnú trubičku odhodte do papierového odpadu.
- Nádobku od solného roztoku vyhodte do odpadu.

REF 9120112870085

